



Odvzem in transport vzorcev za MOLEKULARNE PREISKAVE
P-3-SN-III-NLZOH-CMM-08

DNK VSEH BAKTERIJ (BR-PCR)						
Preiskava	Vrsta vzorca	Trajanje preiskave	Embalaza/Količina vzorca	Način odvzema	Posebnosti	Optimalni čas/Temp. (maksimalni čas)
DNK vseh bakterij	ortopedski material-sonikat	1-3 dni*	posodica/epruveta brez transportnega gojišča/> 1 mL	Vzorci po veljavnih smernicah odvzame usposobljeno zdravstveno osebje.	Preko materiala dolijemo toliko Ringerjeve raztopine, da ga prekrijemo.	≤ 24 ur/sobna temperatura (≤ 72 ur/hladilnik)
	sklepni punkt primarno sterilne telesne tekočine		posodica/epruveta brez transportnega gojišča/> 0,5 mL	Vzorci po veljavnih smernicah odvzame usposobljeno zdravstveno osebje.		

* Ne vključuje sekveniranja

Sobna temperatura je definirana kot: 15-25 °C (European Pharmacopoeia)

Temperatura hladilnika je definirana kot: 2-8 °C (European Pharmacopoeia)